


IQ-CATH TAPPE KATETER

PRODUKTBROSJYRE

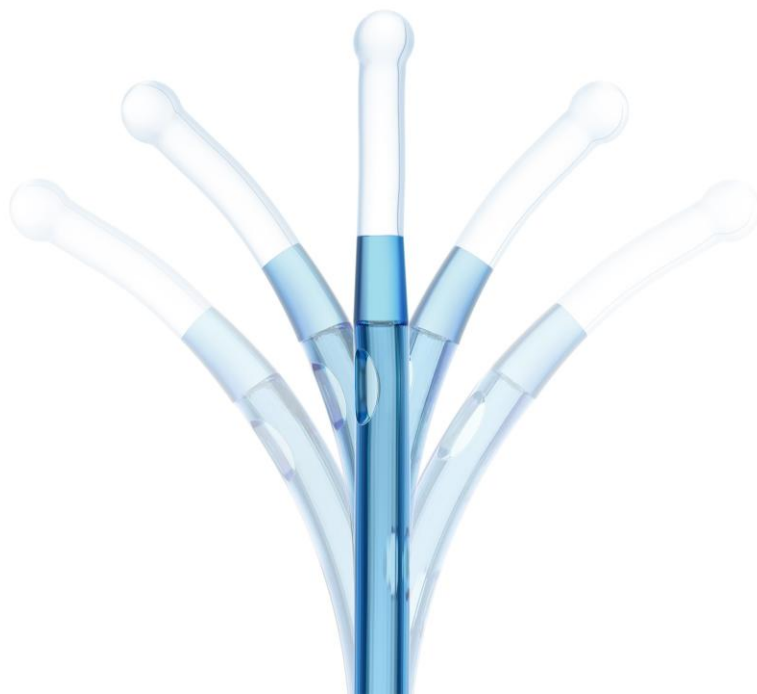

Tappe kateter for særlig skånsom
kateterisering

BERNIEP

MEDICAL

MANFRED SAUER IQ-CATH – KATETER MED KULEFORMET SPISS

IQ-Cath spesialkateter med bøybar kuleformet spiss er utformet for personer som taper seg selv (intermitterende kateterisering). Kateteret passerer særlig godt gjennom urinrør med strikturer, lommer eller bøyer, men også gjennom en spastisk lukkemuskel (sfinkter) eller forstørret prostata.

Spissen på IQ-Cath består av et mykt kuleformet hode plassert på en svært bøyelig "nakke". Denne kombinasjonen gjør at kateteret kan passere strikturer og utbuktninger i urinrøret nærmest uhindret.

Kateterskaftets stivhet egner seg godt for selvkateterisering. Takket være sin konstruksjon passerer kateteret lett gjennom urinrøret, og trykket mot urinrørsveggen er lite.


IQ-Cath-kateteret har en universalkobling som passer til alle standard urinoppsamlingsposer på markedet.

IQ-Cath er tilgjengelig i væske (Klar-til-bruk), med eller uten væske, samt i en reisemodell med integrert væskepose og urinoppsamlingspose.

IQ-Cath finnes også med luer lock-fatning.


IQ CATH-KATETERETS EGENSKAPER:

- bøybar kuleformet spiss – sikker og lett å føre inn,
- erstatter Tiemann, passerer smidig
- passerer godt også ved spastisk urinrør

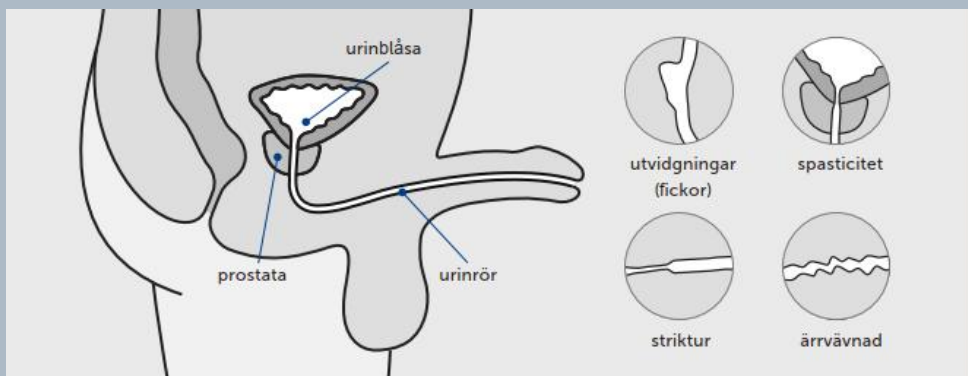

IQ2004.XX HYDROFILT KATETER UTEN VÆSKE – IKKE PÅ HELFO

IQ2004.10 Hydrofilt kateter uten væske. Aktiveres med 0,9 % saltløsning eller vann.
 IQ2004.12 *Funksjonell forpakning*, steril. Total lengde 43 cm, effektiv lengde 40 cm.
 IQ2004.14
 IQ2004.16

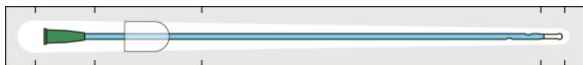

IQ2904.XX HYDROFILT KATETER UTEN VÆSKE – IKKE PÅ HELFO

IQ2904.10 Hydrofilt kateter uten væske. Aktiveres med 0,9 % saltløsning eller vann.
 IQ2904.12 *Peel-open forpakning*, steril. Total lengde 43 cm, effektiv lengde 40 cm.
 IQ2904.14
 IQ2904.16
 IQ2904.18



IQ2104.XX HYDROFILT KATETER MED MEDFØLGENDE VÆSKEPOSE – FINNS PÅ HELFO

IQ2104.10 Hydrofilt kateter med integrert 0,9 % saltløsningspose.
 IQ2104.12 *Funksjonell forpakning*, steril. Total lengde 43 cm, effektiv lengde 40 cm.
 IQ2104.14
 IQ2104.16
 IQ2104.18




IQ2304.XX HYDROFILT KATETER I VÆSKE, KLAR-TIL-BRUK - IKKE PÅ HELFO

IQ2304.10 Hydrofilt kateter i væske, 0,9 % saltløsning. Klar-til-bruk direkte.
 IQ2304.12 *Peel-open forpakning*, steril. Total lengde 43 cm, effektiv lengde 40 cm.
 IQ2304.14
 IQ2304.16
 IQ2304.18



IQ4304.XX HYDROFILT KATETER I VÆSKE, KLAR-TIL-BRUK, MED SLEEVE – IKKE PÅ HELFO

IQ4304.10 Hydrofilt kateter i væske, 0,9 % saltløsning. Klar-til-bruk direkte, med sleeve.
 IQ4304.12 *Peel-open forpakning*, steril. Total lengde 43 cm, effektiv lengde 40 cm.
 IQ4304.14
 IQ4304.16
 IQ4304.18

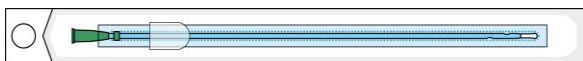

IQ6014.XX HYDROFILT LUER LOCK-KATETER UTEN VÆSKE - IKKE PÅ HELFO

IQ6014.12 Hydrofilt kateter uten væske, med luer lock-kobling. Aktiveres med 0,9 % saltløsning
 eller vann.
 IQ6014.14 *Funksjonell forpakning*, steril. Total lengde 43 cm, effektiv lengde 40 cm.



De to siste sifrene i produktnummeret angir Charrière-størrelsen. Kateterne er pakket i esker à 30 stykk.



Den unike bøybare kuleformede spissen styrer kateteret varsomt og sikkert gjennom urinrøret. IQ-Cath passerer også godt gjennom en spastisk lukkemuskel (sfinkter).

Kateterets ekstra lange konnektor gir et bedre grep og enklere håndtering.




IQ2902.XX HYDROFILT KATETER UTEN VÆSKE - IKKE PÅ HELFO

IQ2902.10 Hydrofilt kateter uten væske. Aktiveres med 0,9 % saltløsning eller vann.
 IQ2902.12 *Peel-open forpakning*, steril. Total lengde 17 cm, effektiv lengde 12 cm.
 IQ2902.14




IQ2302.XX HYDROFILT KATETER I VÆSKE, KLAR-TIL-BRUK - IKKE PÅ HELFO

IQ2302.10 Hydrofilt kateter i væske, 0,9 % saltløsning. Klar-til-bruk direkte.
 IQ2302.12 *Peel-open forpakning*, steril. Total lengde 17 cm, effektiv lengde 12 cm.
 IQ2302.14

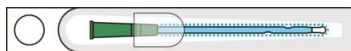


De to siste sifrene i produktnummeret angir Charrière-størrelsen. Kateterne er pakket i esker à 30 stykk.

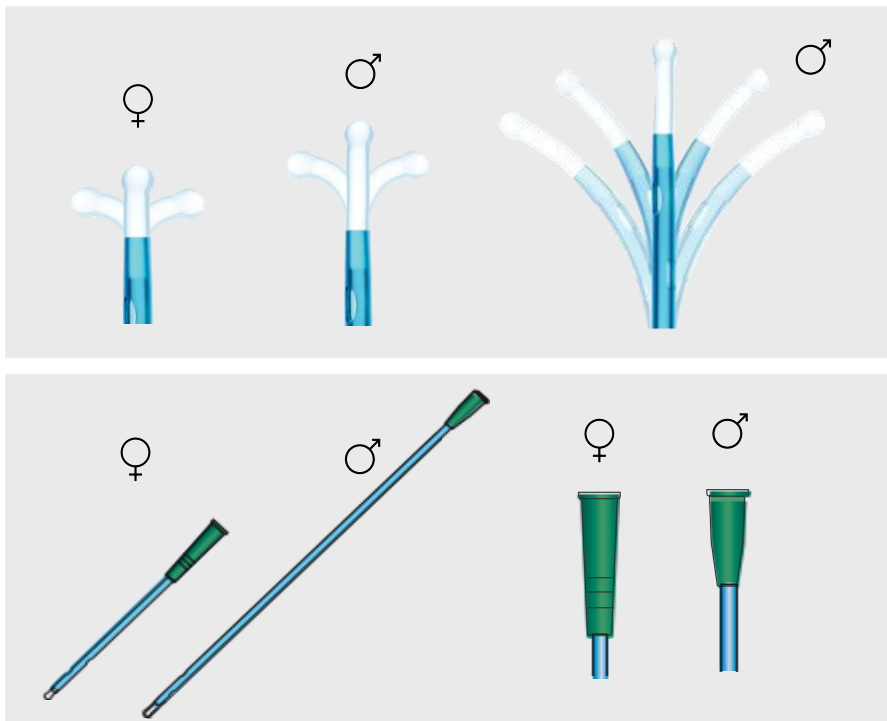

IQ2303.XX HYDROFILT KATETER I VÆSKE, KLAR-TIL-BRUK - IKKE PÅ HELFO

IQ2303.10
 IQ2303.12
 IQ2303.14


Hydrofilt kateter i væske, 0,9 % saltløsning. Klar-til-bruk direkte.
 Peel-open forpakning, steril. Total lengde 33 cm, effektiv lengde 30 cm.

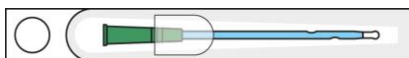

IQ4303.XX HYDROFILT KATETER I VÆSKE, KLAR-TIL-BRUK, MED SLEEVE - IKKE PÅ HELFO

IQ4303.10
 IQ4303.12
 IQ4303.14

Hydrofilt kateter i væske, 0,9 % saltløsning. Klar-til-bruk direkte, med sleeve.
 Peel-open forpakning, steril. Total lengde 33 cm, effektiv lengde 30 cm.

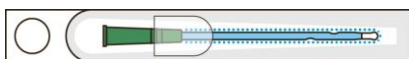


De to siste sifrene i produktnummeret angir Charrière-størrelsen. Kateterne er pakket i esker à 30 stykk.

FORPAKNINGER

FUNKSJONELL FORPAKNING – for allsidig bruk

Den funksjonelle forpakningen kan brukes som en forlengelse for å tømme urinen direkte i toalettet. Før konnektoren mot spissen for å tette posen.

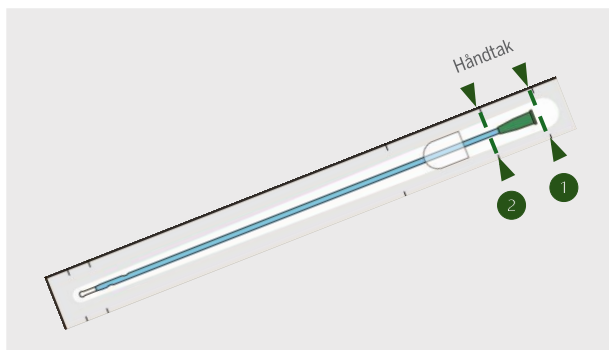

PerforeringEr

- ▼ Riv av her
- ① Åpning
- ② Riv av med et rykk ved markeringene for å lage et håndtak som kan brukes ved innføringen.


PEEL-OPEN FORPAKNING – for enkelheten

Peel-open forpakningen er lett å åpne. Hull for fingrene gjør det enklere å åpne forpakningen uten å berøre kateteret.




IQ CATH

**MED BØYBAR OG FLEKSIBEL KULEFORMET SPISS
SIKKER OG PÅLITELIG VED INTERMITTERENDE KATETERISERING**

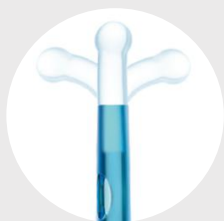


KULEFORMET SPISS

Den unike kuleformede spissen med bøyelig "nakke" styrer kateteret varsomt og sikkert gjennom urinrøret.

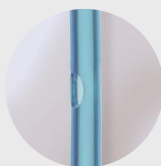

MYKE ØYNE

Kateterets øyne er avrundet for å forhindre skader på urinrørets følsomme slimhinne.

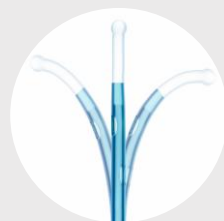

FLEKSIBELT KATETER

Den kuleformede spissen og den fleksible sonen, etterfulgt av det forholdsvis stivere skaftet, gjør IQ-Cath enkel å føre inn og utøver lite trykk mot urinrørsveggen.

Produsert av Manfred Sauer
Medisinteknisk produkt Class I



ER DET NOE DU LURER PÅ? VI HJELPER DEG GJERNE!

Kundeservice & Bestillinger

(+47) 96 00 06 13

order.medical.no@bernercompany.com

Berner Medical er en pålitelig partner for helsepersonell. Vi forbedrer livskvaliteten ved å tilby løsninger som støtter menneskers velvære og funksjonsevne. Vi betjener offentlig og privat helse- og omsorgstjeneste, omsorgssektoren og bedrifter spesialisert på profesjonell rengjøring. Våre styrker er et omfattende produktsortiment, leveringssikkerhet, produktopplæring og tverrfaglig ekspertise.

Besøk oss gjerne på www.bernermedical.no

BERNER

MEDICAL

BMNOPB2-2/2026